

Chemikálie > Čistící a dezinfekční prostředky > Pro plochy, povrchy a nástroje
> Chirosan Plus, práškový dezinfekční přípravek

PDF

Chirosan Plus, práškový dezinfekční přípravek

Zdravotnický prostředek

Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi generované kyseliny peroxyoctové. Je určen pro dezinfekci nástrojů, endoskopů a povrchů zdravotnických prostředků, a to otěrem nebo ponořením. Je možné ho použít i v ultrazvukových čističkách.



- typ přípravku: Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 1023]
- účinné látky: generovaná kyselina peroxyoctová
- plné spektrum účinnosti
- materiálově kompatibilní s běžnými materiály používanými ve zdravotnictví (chirurgická ocel, sklo, plast, plexisklo, porcelán, keramika)
- nevhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku, pryže a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem
- **oblast použití:** jednorázová dezinfekce, druhý a vyšší stupeň dezinfekce zdravotnických pomůcek, operačních, anesteziologických a zubařských nástrojů (endoskopů, dentálních otiskovacích hmot, inkubátorů, vodoléčebných van, dýchacích masek atd.), dezinfekce ploch a předmětů otěrem
- pouze pro profesionální použití (před použitím čtěte přiložené pokyny)

Spektrum účinnosti přípravku Chirosan Plus:

- baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní

Doporučený způsob použití přípravku Chirosan Plus

Do dezinfekční nádoby odměřte množství vody o teplotě $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1$. Vsypete odměřené množství prášku Chirosan Plus a důkladně zamíchejte. Po 15minutové aktivaci a opětovném důkladném promíchání je roztok připraven k použití. Nástroje určené k opětovnému použití se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Poté se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Při použití na vodoléčebné vany je doporučeno aplikovat 2% koncentraci po dobu 5 min. Poté je nutný oplach horkou vodou.

Obj. číslo	Popis balení	Obsah [g]	Dostupnost	Cena / ks
900 003 292 164	Kbelík	1500	3-4 týdny	984 Kč
900 003 292 121	Kbelík	6000	3-4 týdny	3 545 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Katalogový-list-Chirosan-Plus.pdf



Bezpečnostní-list-Chirosan-plus.pdf